

# 692

## Vouwbare oprijgoten

Een scooter of rolstoel in de auto rijden kan vlot dankzij de oprijgoten. Deze vouwbare oprijgoten zorgen ervoor dat u op een veilige manier zware scooters en rolstoelen in een wagen kan plaatsen. Één set bevat twee oprijgoten.



Inclusief opbergassen.  
Één set bevat twee oprijgoten.




Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

## Grensverleggend in mobiliteit



# Technische informatie 692

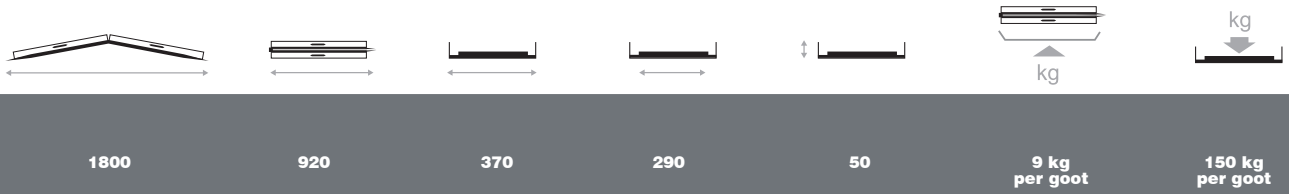

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

**01** Handvaten om de goten gemakkelijk te transporteren

**02** Anti-slip oppervlak voor meer grip van de rolstoel of scooter

**03** Gebruikersgewicht tot 150 kg per plaat

## Gebruik van de oprijgoten

De oprijgoten zijn makkelijk in gebruik te nemen door volgende stappen uit te voeren.

1. Vouw de plaat open.
2. Plaats de anti-slip overlapping op het te overkomen oppervlak.
3. Zorg dat de platen stabiel liggen.
4. Rij de scooter of rolstoel op de platen omhoog zonder inzittende.

**04** Voorzien van anti-slip oppervlak voor grip van de oprijgoten



## VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:  
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout  
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.co.nl](http://www.vermeiren.co.nl) - [orders@vermeiren.co.nl](mailto:orders@vermeiren.co.nl)

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.



**VERMEIREN**  
Grensverleggend in mobiliteit



Voorbehouden technische wijzigingen